



TOOLKIT
MASCARILLA DUCKBILL

1. DESCRIPCIÓN




MASCARILLA DUCKBILL

Diseño ergonómico tipo pato, según recomendaciones de los CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades)

- Elaborada con 3 capas de material; 2 capas antilíquido (externo e interno) y una capa central que funciona como filtro para mayor protección.
- Ajuste universal gracias a su sistema de elásticos con seguro y al diseño de puente integrado en la nariz.
- Sus propiedades se conservan hasta por 50 lavadas.
- Talla Única
- Empaque individual bolsa tipo ziploc

2. MATERIALES

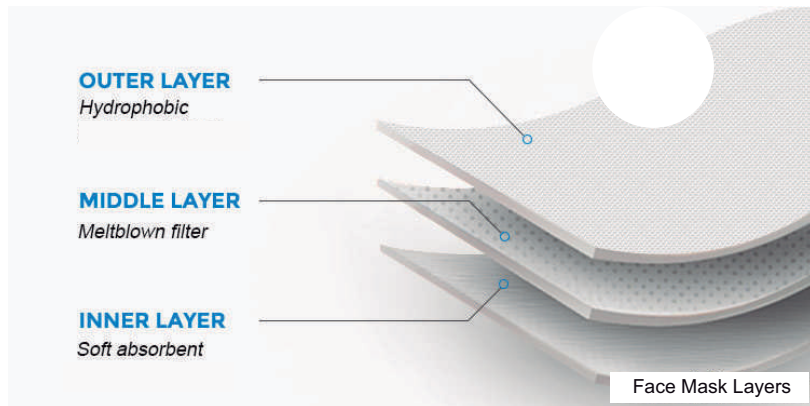

CAPA EXTERNA - CAPA INTERNA: UNIVERSAL CLORO RESISTENTE ANTIFLUIDO (LAFAYETTE)

- Composición: 100% Poliéster.
- Peso: 137 ± 7 gm² / Ancho Total: 148 ± 3 cm
- Tecnología Anticlora (Norma AATCC 61).
- Tecnología Antifluído/Repelencia, repele el agua y evita el paso de salpicaduras accidentales, la cual permanece a través de los lavados (Normas AATCC 22/ AATCC 124).
- Tecnología en Protección Solar, evita el paso de los rayos UV, actuando como un escudo protector (Norma AATCC 183).
- Textil suave y confortable, ideal para todo tipo de climas.

CAPA MEDIA:

E025 LIFOR FABRICATO

- Composición: 100% Poliéster.
- Peso: 37 ± 10 gm² / Ancho Total: 150 ± 3 cm
- No tejido.
- Antifluído.
- Alto nivel de filtración, garantizando el paso de aire.
- Hipoalergénico

BORDE INTERNO:

HYDROTECH ANTIBACTERIAL(LAFAYETTE)

- Composición: 100% Poliéster.
- Peso: 138 ± 8 gm² / Ancho Total: 148 ± 3 cm
- Tecnología Antibacterial (Norma JIS L1902).
- Tecnología en Protección Solar (Norma AATCC 183).
- Tecnología en Transpirabilidad, permite captar y secar la humedad manteniendo al usuario cómodo y seco (Norma AATCC79).
- Excelente stretch mecánico.
- Tejido tipo malla que permite la respirabilidad.



3. INSUMOS



AJUSTE NASAL PARA TAPABOCAS (BEDFORD)


Usado como soporte superior para cualquier tipo de cubre bocas.

- Cinta de plástico, papel color blanco.
- Medida: 8cms.



ELÁSTICO BASE SESGO (BANDEL)

- Elástico Plano
- Composición 86% Poliéster-14% Elastómero.
- Color: Negro.
- Ancho: 5mm
- Peso(1 m): 1,07Gr
- Porcentaje de elongación: 130±10 %.

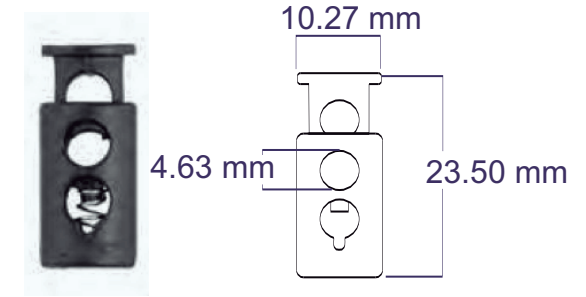


SEGURO CORDÓN DOBLE VERTICAL DE 4mm

- Materia Prima: Acetal.
- Medida: 4mm.
- Espesor: 6.10mm.
- Peso: 0.79 grs.
- Resistencia a Tracción: 2.420 Kg.



BOLSA TIPO ZIPLOCK

- Medidas: 14 cms X 26 cms.

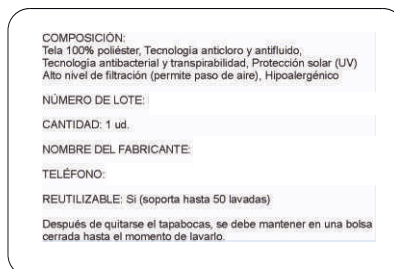

STICKER ADHESIVO


- Medida: 7,4cm x 5cm.
- Ubicación: área blanca instructivo



INSTRUCTIVO

- Medida: 12cm x 14cm.
- Material: Propalcote C2S 250grs.
- 4 X 4 Tintas.
- Acabado PLASTIFICADO MATE troquelado.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Diseño de puente nasal integrado, que se ajusta a la anatomía de la cara y garantiza un mayor hermetismo


Ajuste universal gracias a su sistema de tiras elásticas con tancas que ayuda a reducir los puntos de presión en la piel.

Diseño Duckbill (Tipo Pato) ayuda a minimizar la acumulación de humedad y facilita la transpirabilidad.

Tejido en borde interior que contribuye con el sellado y ofrece gran comodidad al usuario por su delicado tacto con la piel

Cobertura hasta la barbilla para mayor protección

5. DIMENSIONES FINALES

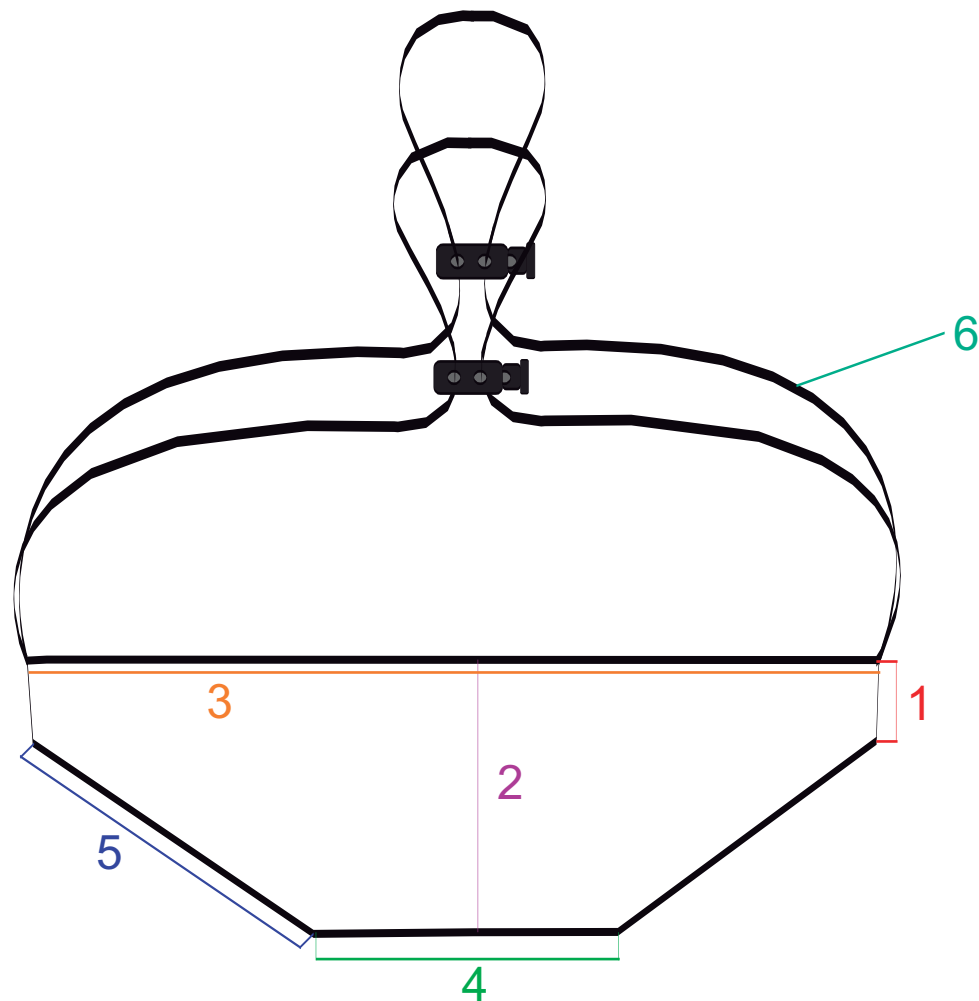

#	MEDIDA FINAL CM	TOLERANCIA MM
1	2,5 cm	±3 mm
2	10,8 cm	±5 mm
3	25 cm	±7 mm
4	10 cm	±5 mm
5	11,5 cm	± 5mm
6	58 cm	±7 mm

6. CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Lavar a mano o en máquina con agua fría.
Cuidando de no deteriorar o deformar el clip nasal.
- Usar detergente suave.
- No usar blanqueador.
- No secar en máquina.
- Secar a la sombra.
- Guardar el producto en un lugar que garantice su higiene después de lavarlo.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- No se debe usar tapabocas de tela en niños menores de 2 años.
- No se debe poner tapabocas de tela a personas con problemas para respirar, o que presenten alguna condición que les impida quitárselo sin ayuda.
- Incluye tres capas de tela.
- Este tapabocas de tela no es mascarilla quirúrgica ni respirador N95.
- Este tapabocas debe ser desechado en caso de que se haya dañado poniendo en riesgo su eficacia, por ejemplo si se ha roto o deformado o que los elásticos no cumplan con su función.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Se recomienda lavar el tapabocas antes del primer uso.
- Se debe lavar el tapabocas posterior a su uso.
- Colocar el tapabocas sobre la cara asegurando que cubra la boca, la nariz, la barbilla y ajustando el clip nasal.
- Lavarse las manos al ponerse y al quitarse el tapabocas de tela.
- Al usar el tapabocas, colocar los cordones elásticos en las orejas o ajustar los elásticos de acuerdo al diseño.
- Al retirar el tapabocas de tela no tocarse los ojos, la nariz, ni la boca.
- Después de quitarse el tapabocas, se debe mantener en una bolsa cerrada hasta el momento de lavarlo.
- Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (Ej. Mesas, repisas, entre otros) por el riesgo de contaminarlas.
- Este tapabocas puede ser usado de manera continua durante un día (Máximo 8 horas diarias).

**100% POLIÉSTER.
HECHOS CON TELA.
ANTIFLUIDO Y CON FILTRO UV.
SUS PROPIEDADES SE CONSERVAN HASTA
POR 50 LAVADAS.**

7. INSTRUCTIVO DE EMPAQUE


INSTRUCCIONES

Al inicio del empaque se deben tener como mínimo: Instructivo de empaque de la mascarilla, ficha técnica y muestra aprobada del producto que se va a empaque.

1. Revisar que la mascarilla esté complete e íntegra.



2. Colocar las tiras elasticas y las tancas al interior de la mascarilla.

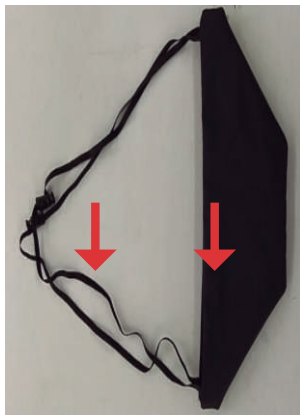

7. INSTRUCTIVO DE EMPAQUE

3. En la parte inferior derecha de la cara posterior del instructivo de la Mascarilla Duckbill se debe poner el sticker de identificación.

REACTIVANDO A COLOMBIA | TAPABOCAS

Un producto simple y poderoso, capaz de reactivar nuestro país al dar nuevas oportunidades de trabajo a familias vulnerables, reducidos y empresas saltflites, y cuidar la salud de miles de tenderos.

Su revolucionario diseño hecho por Bavaria - AB InBev es tan cómodo que evita que las personas se toquen constantemente la cara, que se le empañen las gafas y cuida el medioambiente, pues se puede lavar hasta 50 veces.

Se trata de un tapabocas de tres capas (2 capas de Textil Cloro-resistente Antifluído, entre ellas un filtro No Tejido en Poliéster; además, tiene un contorno de contacto facial en Hydrotech Antibacterial); su diseño facilita la respiración y evita la transpiración del rostro. Es muy seguro, ya que está hecho con materiales de alta calidad y la comodidad de su diseño evita que las personas se laven las manos a la cara o lo usen de forma incorrecta.

USO

Durante la emergencia sanitaria por el Covid 19, el uso del tapabocas es indispensable para la población en general como medida de protección.

Consérvese bajo condiciones de almacenamiento y seguridad adecuadas.


INSTRUCCIONES DE USO, LAVADO Y DESINFECCIÓN

- Lavar antes del primer uso y posterior a su uso.
- No secar a máquina, sino a la sombra.
- Lavar a mano o en máquina con agua fría, cuidando no deteriorar o deformar el clip nasal.
- Guardar el producto en un lugar que garantice la higiene después de lavarlo.
- Usar detergente suave.

Las características antifluído de la tela pueden durar entre 40 y 50 lavadas, dependiendo del cuidado en el lavado. Se recomienda lavar a mano.

Antes de usar el tapabocas y al retirarlo después, debes lavar las manos con agua y jabón o algún desinfectante a base de alcohol.

Inspeccionar el tapabocas antes de usar; caso de encontrarse roto, deformado o que los elásticos no cumplan su función, debe desecharse.



Colócate el tapabocas y asegúrate de que la mascarilla cubra la boca, nariz y barbilla.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

Para quitarte el tapabocas retira las cintas elásticas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, buscando no tener contacto con las superficies potencialmente contaminadas.

El tapabocas debe ser lavado con agua y jabón, secado y posteriormente guardado en la bolsa original o en algún lugar donde se pueda garantizar su higiene.

No apto para uso hospitalario. No es una mascarilla quirúrgica ni respirador N95. El tapabocas es para uso personal.

Evita tocar constantemente el tapabocas mientras lo usas; y si lo haces, recuerda lavarte las manos con agua y jabón o con algún desinfectante a base de alcohol.


Los tapabocas solamente son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de las manos.

Los tapabocas deben usarse por un tiempo máximo de 8 horas; después deben lavarse para volver a utilizarlos.

Este producto cumple con los lineamientos mínimos expedidos por el Ministerio de Protección Social en mayo de 2020 para la fabricación de tapabocas de uso general, no hospitalario, en el marco de la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19.

Para uso de adultos únicamente. Producto no apto para menores.

PRODUCTO PARA DONACION QUE NO PUEDE SER COMERCIALIZADO

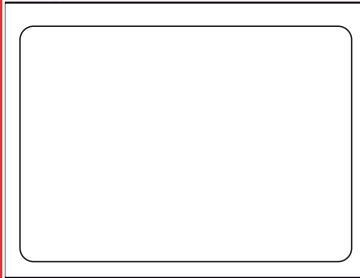

COMPOSICIÓN:
Tela 100% poliéster, Tecnología anticloro y antifluído,
Tecnología antibacterial y transpirabilidad, Protección solar (UV)
Alto nivel de filtración (permite paso de aire), Hipoalergénico

NÚMERO DE LOTE: _____

CANTIDAD: 1 ud.

NOMBRE DEL FABRICANTE: _____

TELÉFONO: _____

REUTILIZABLE: Si (soporta hasta 50 lavadas)

Después de quitarse el tapabocas, se debe mantener en una bolsa cerrada hasta el momento de lavarlo.

7. INSTRUCTIVO DE EMPAQUE


4. Se toma la bolsa plástica ziploc de 26 cm X 16,2 cm (esta debe estar en buen estado y libre de suciedad y/o partículas) y se empaca la mascarilla.



5. Colocar dentro de la bolsa el instructivo de uso de la mascarilla como se indica en la siguiente imagen.



6. Una vez empacados todos los elementos dentro de la bolsa, esta se debe sellar de tal manera que no permita el ingreso de contaminación y/o partículas externas.

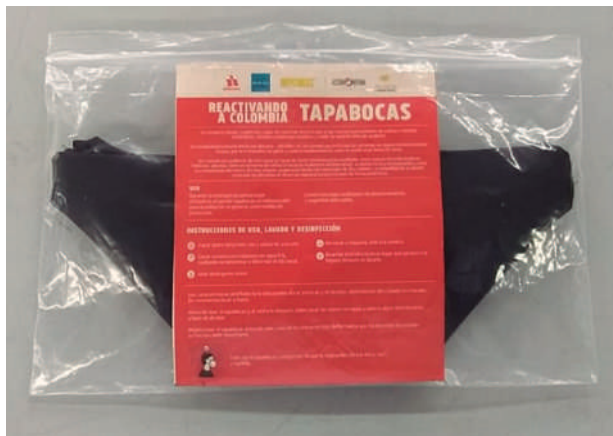

7. Empacar 300 unidades por caja que no supere 15kg de peso.

SEGURIDAD Y CUIDADOS ESPECIALES

- Realizar control de calidad en cada una de las etapas del proceso.
- Tener muestra aprobada en condiciones adecuadas para no alterar las características.
- En caso de duda, hablar con superior inmediato.