




**TOOLKIT**  
**MASCARILLA KIDS**

# 1. MATERIALES


## MASCARILLA KIDS

DE TRES CAPAS, TELA EXTERIOR BLANCA SUBLIMADA CON ELASTICO PLANO AJUSATBLE EN BOLSA INDIVIDUAL RESELLABLE Y AJUSTE NARIZ

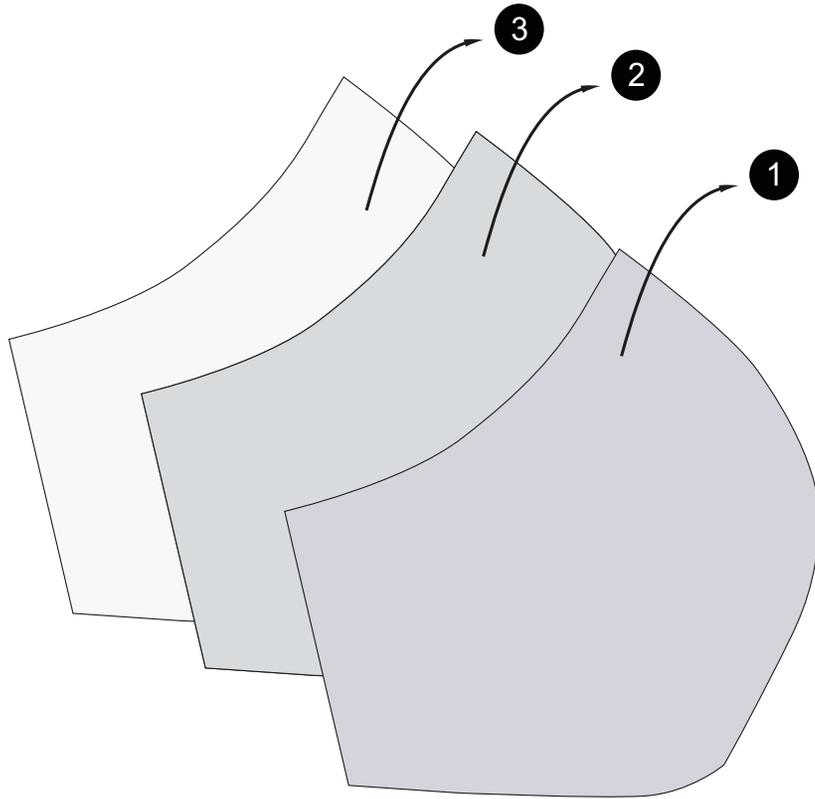


- 1 TEXTIL 1 CAPA EXTERNA
- 2 TEXTIL 2 CAPA INTERMEDIA
- 3 TEXTIL 3 CAPA INTERNA
- 4 ELASTICO BLANCO PLANO 5MM
- 5 HILO
- 6 SOPORTE NASAL
- 7 TENSOR


CARACTERISTICAS
TEXTIL UNIVERSAL CLORORESISTENTE ANTIFLUIDO
TEXTIL NO TEJIDO LIFOR
TEXTIL HIDROTECH ANTIBACTERIAL BLANCO
HILO DE ALGODON BLANCO PARA TODAS LAS COSTURAS
SOPORTE NASAL DE 8 CMS DE LARGO ENMARCADO CON COSTURA
TENSOR METALICO

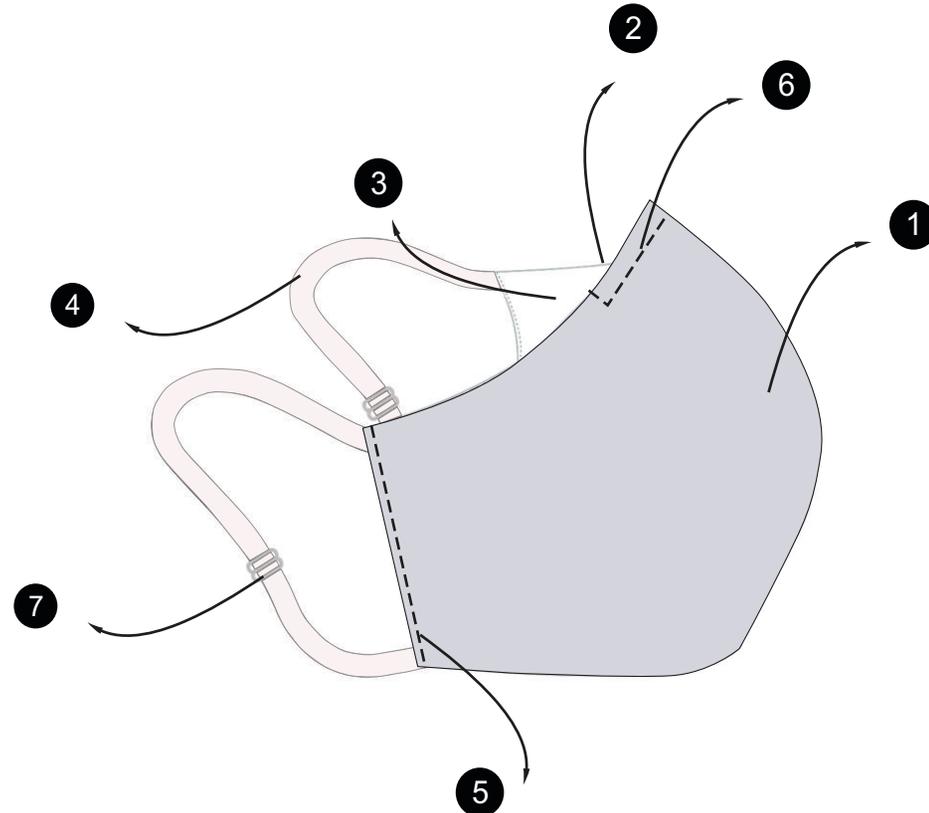


## 2. CARACTERISTICAS EXTERNAS

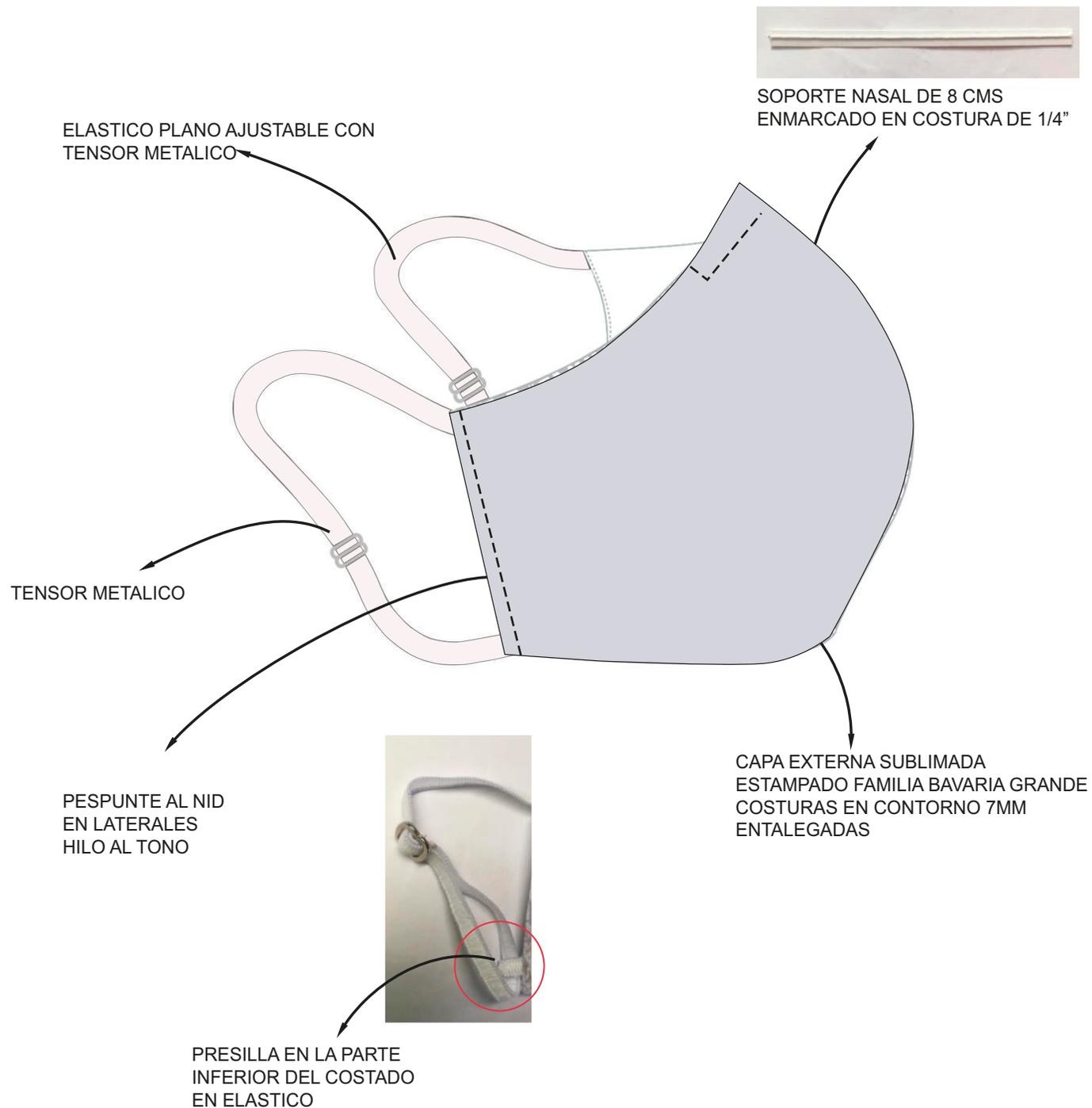

# 3. CARACTERISTICAS INTERNAS

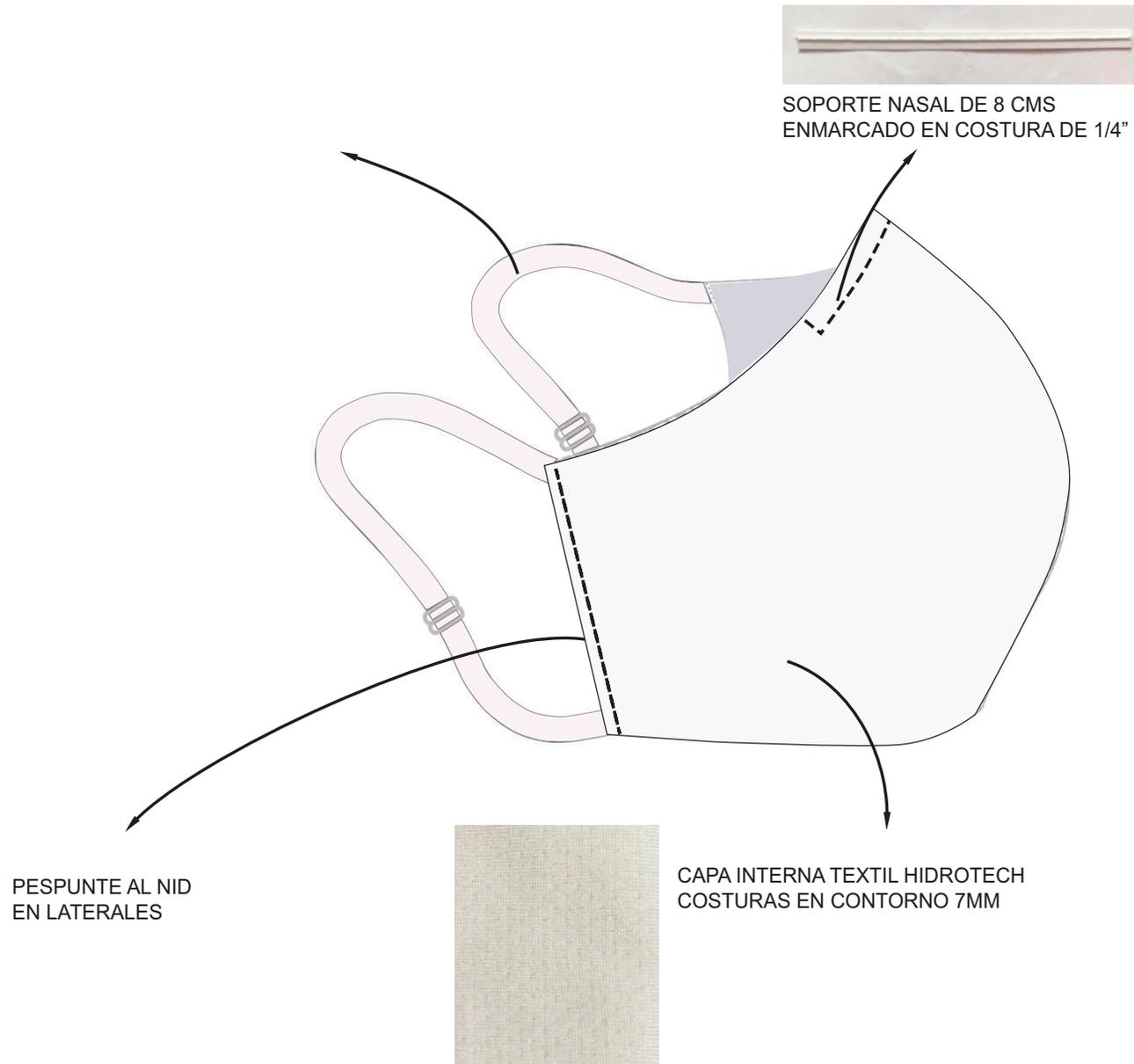

# 4. DIMENSIONES MASCARILLA TERMINADA

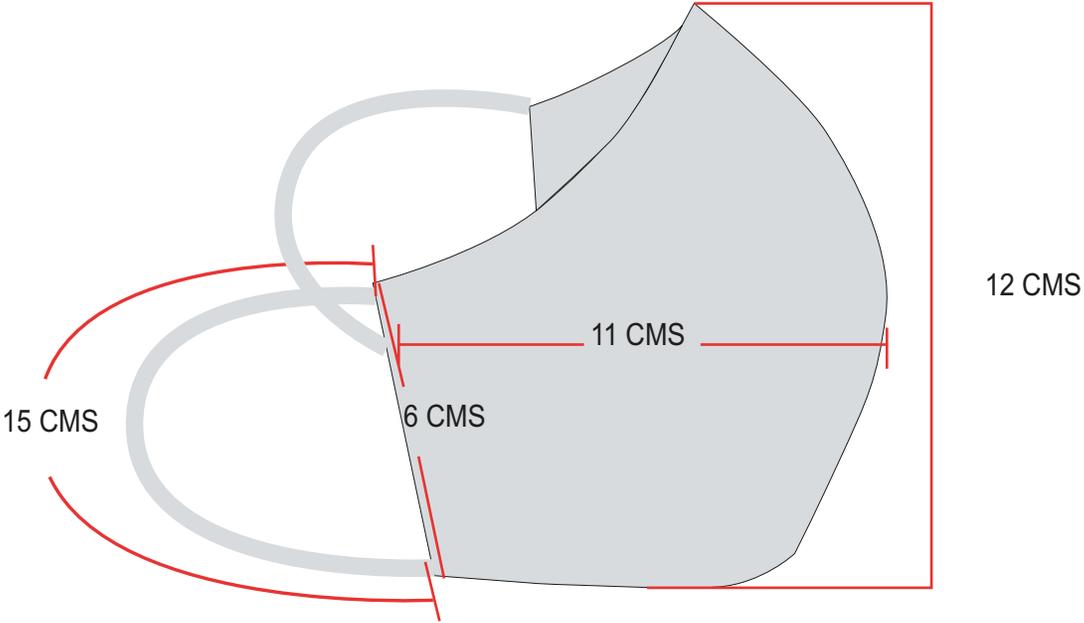

# 5. EMPAQUE

## EMPAQUE

1 UBICAR MASCARILLA



# 5. EMPAQUE

- 2 UBICAR LA TARJETA DE INSTRUCCIONES PARA LA MASCARILLA PARA NIÑOS, LA CUAL INCLUYE EN LOS EXTREMOS DE LA PARTE SUPERIOR LOS DIBUJOS DE NIÑO Y UN RECUADRO BLANCO EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA

**TAPABOCAS FAMILIA**

Este tapabocas ha sido diseñado en tres capas que permiten la protección respiratoria de alto nivel requerida para la contención sanitaria por COVID-19, este elemento está compuesto por una capa exterior con tecnología antimicrobial, compresión y anti-flujo, una capa intermedia que actúa como filtro adicional y una capa interior altamente respirable con tecnología antibacteriana.

Cada vez que te quites un tapabocas, guárdalo en el empaque en el que te fue entregado para que lo laves de manera segura a tu hogar para ser lavado.

Los tapabocas reutilizables no reemplazan el equipo de protección personal de grado médico. Recuerda que el uso de tapabocas reutilizables no está destinado a reemplazar otras medidas recomendadas para detener la propagación de COVID-19, como desinfectamiento frotto, lavarse las manos y evitar tocar la cara. Sigue los últimos consejos del gobierno colombiano y entidades de salud sobre la mejor manera de mantenerse a salvo.

Este es un producto adecuado para niños mayores de 6 años, sin embargo debe ser usado bajo supervisión permanente de un adulto responsable.

**INSTRUCCIONES DE USO**

Antes usar el tapabocas. Debes lavarte las manos muy bien con agua y jabón.

Revisa el tapabocas. Asegúrate que no tenga defectos, agujeros ni desgarros en el material. Si tiene alguna de estas deficiencias no lo uses y deséchalo adecuadamente.

Asegúrate que el lado flexible del clip nasal esté orientado hacia arriba antes de ponerte el tapabocas.

Asegúrate que el lado correcto del tapabocas quede hacia afuera. El interior es de color blanco y el exterior es de otros colores, revisa que el lado blanco vaya hacia la cara.

Tómalo de las correas para evitar tocar el resto de la superficie y usa el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible del borde superior, alrededor del puente de la nariz.

Ponte las correas detrás de las orejas y ajusta cuanto sea necesario para que quede fijo sin que te moleste o lastime.

Ajusta el tapabocas en la cara y debajo de la barbilla. Una vez el tapabocas está totalmente asegurado, asegúrate de que cubra la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de la barbilla.

**INSTRUCCIONES DE LAVADO Y DESINFECCIÓN**

Debes lavar diariamente esta mascarilla después de su uso, lo recomendable es lavarla a mano con agua y jabón de tocador. Desinfectándola un minuto en cloro (1 capa de cloro x 10 de agua), no debe superar este tiempo y enjuagarlo muy bien.

**RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS**

Este tapabocas tiene una duración aproximada de 10 lavadas, una vez terminado ese periodo el tapabocas seguirá siendo útil pero la tecnología con la que ha sido fabricado ya no estará presente, por lo cual se recomienda botarlo sin antes haberlo lavado y desinfectado.

Este producto cumple con los lineamientos mínimos expedidos por el Ministerio de Protección Social en mayo de 2020 para la fabricación de tapabocas de uso general, no hospitalario, en el marco de la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19.

**COMPOSICIÓN:**  
Tela 100% poliéster, Tecnología anticloro y anti-fluido,  
Tecnología antibacterial y transpirabilidad, Protección solar (UV)  
Alto nivel de filtración (permite paso de aire), Hipoalergénico

**NÚMERO DE LOTE:**

**CANTIDAD:** 1 ud.

**NOMBRE DEL FABRICANTE:**

**TELÉFONO:**

**REUTILIZABLE:** Sí (soporta hasta 50 lavadas)

Después de quitarse el tapabocas, se debe mantener en una bolsa cerrada hasta el momento de lavarlo.

## STICKER ADHESIVO

- Medida: 7,4cm x 5cm.
- Ubicación: área blanca instructivo

**REACTIVANDO A COLOMBIA TAPABOCAS**

Este producto cumple con los lineamientos mínimos expedidos por el Ministerio de Protección Social en mayo de 2020 para la fabricación de tapabocas de uso general, no hospitalario, en el marco de la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19.

**INDICACIONES:** Este producto cumple con los lineamientos mínimos expedidos por el Ministerio de Protección Social en mayo de 2020 para la fabricación de tapabocas de uso general, no hospitalario, en el marco de la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19.

**INSTRUCCIONES DE USO, LAVADO Y DESINFECCIÓN**

Debes lavar diariamente esta mascarilla después de su uso, lo recomendable es lavarla a mano con agua y jabón de tocador. Desinfectándola un minuto en cloro (1 capa de cloro x 10 de agua), no debe superar este tiempo y enjuagarlo muy bien.

**RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS**

Este tapabocas tiene una duración aproximada de 10 lavadas, una vez terminado ese periodo el tapabocas seguirá siendo útil pero la tecnología con la que ha sido fabricado ya no estará presente, por lo cual se recomienda botarlo sin antes haberlo lavado y desinfectado.

**REACTIVANDO A COLOMBIA TAPABOCAS**

Este producto cumple con los lineamientos mínimos expedidos por el Ministerio de Protección Social en mayo de 2020 para la fabricación de tapabocas de uso general, no hospitalario, en el marco de la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19.

**INDICACIONES:** Este producto cumple con los lineamientos mínimos expedidos por el Ministerio de Protección Social en mayo de 2020 para la fabricación de tapabocas de uso general, no hospitalario, en el marco de la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19.

**INSTRUCCIONES DE USO, LAVADO Y DESINFECCIÓN**

Debes lavar diariamente esta mascarilla después de su uso, lo recomendable es lavarla a mano con agua y jabón de tocador. Desinfectándola un minuto en cloro (1 capa de cloro x 10 de agua), no debe superar este tiempo y enjuagarlo muy bien.

**RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS**

Este tapabocas tiene una duración aproximada de 10 lavadas, una vez terminado ese periodo el tapabocas seguirá siendo útil pero la tecnología con la que ha sido fabricado ya no estará presente, por lo cual se recomienda botarlo sin antes haberlo lavado y desinfectado.

## INSTRUCTIVO

- Medida: 12cm x 14cm.
- Material: Propalcote C2S 250grs.
- 4 X 4 Tintas.
- Acabado PLASTIFICADO MATE troquelado.

# 5. EMPAQUE

3 INTRODUCIR LA MASCARILLA Y LA TARJETA DE INSTRUCCIONES EN FORMA VERTICAL DENTRO DE LA BOLSA ZIPLOC

